

# סיטוג'ן – איסוף דם טבורי

## מדריך מקוצר למיילדת

**6. א'** חבריי את מזרק תמיסת החיטוי לתחתית האביזר והזריקי באיטיות עד למילוי התא.



**ב'** המתיני 10 שניות ונקזי בחזרה את התמיסה למזרק.

**7.** חברי את שקית איסוף הדם למחבר בתחתית האביזר.




Connect collection bag.

**8.** פתחי את מספרי האיטוב – הדם אמור להתחיל למלא את השקית.




**9.** מידי מספר שניות נקזי את חבל הטבור על ידי חליבתו מכיוון השליה לאביזר.

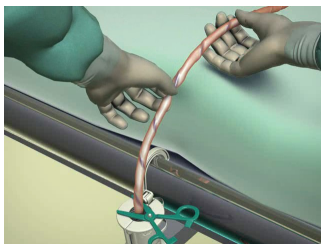


**1.** לפני הלידה פעלי בהתאם להנחיות ההכנה לפני הלידה שבמדריך למשתמש המצורף לערכה.

**2.** אטבי את חבל הטבור באמצעות מספרי האיטוב במרחק 2 ס"מ מאטב התינוק וחתכי בין האטבים.

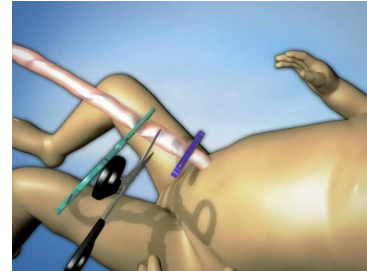


**3.** נקזי את הדם מהאטב לכיוון השלייה ואטבי במרחק של כ- 12.5 ס"מ מעל מספרי האיטוב התחתונים בעזרת מספרי האיטוב הנוספים.

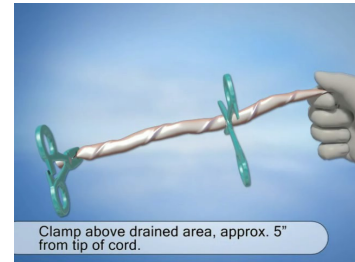

Clamp above drained area, approx. 5" from tip of cord.

**4.** הסירי את האטב התחתון ונקי היטב בעזרת מגבוני החיטוי הגדולים את חבל הטבור מתחת למספרי האיטוב העליונים לסילוק תאי גזע אימהיים.

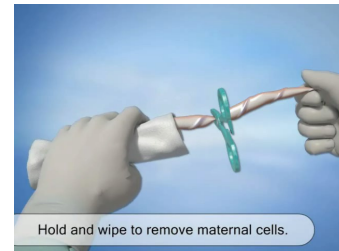

Hold and wipe to remove maternal cells.

**5. א'** הכניסי את חבל הטבור למוביל וקבעי את מספרי האיטוב בפין בראש המוביל. השחילי את קצה חבל הטבור לתוך התא הנקי (השקוף) עד שקצהו יראה לך.

**ב'** נעלי את שני חלקי האביזר על ידי סיבוב בכיוון החץ "Lock".

**ב'**

**א'**

